

# SANIT Augenspülfasche inkl. steriler Füllung



SANIT-CHEMIE  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



Aus dem Sortiment:



## Beschreibung

- Augenspülfasche als Erste Hilfe Maßnahme bei einem Unfall mit Chemikalien etc.

## Anwendungsgebiete

- Für das menschliche Auge

## Anwendung

Verschlusskappe abnehmen, Kopf nach vorn beugen oder notfalls die Flasche über das Auge halten. Augenglieder mit Daumen und Zeigefinger offen halten. Flasche pumpend zusammendrücken.

Nach jedem Augenunfall und jeder erforderlich gewordenen Augenspülung ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

## Mindesthaltbarkeit

- 36 Monate (im versiegelten Zustand)

## Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	500 ml Flasche	3181



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.