

NEU



SANIT ErsteHilfe Plus

Das **SANIT ErsteHilfe Plus** ist die ideale Ergänzung für jeden Handwerker. Um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, bildet das Set die praktische Soforthilfe für alle erdenklichen, täglich auftretenden Beschwerden. Perfekt abgestimmt auf jeden Handwerkerbedarf.

SANIT ErsteHilfe Plus

Von Profis für Profis



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Beschreibung

Das **SANIT ErsteHilfe Plus** ist Pflichtausstattung für jeden Handwerker. Verletzungen und Bewegungseinschränkungen verlangen nach sofortiger Schmerzlinderung und Abhilfe. Mit dem **SANIT ErsteHilfe Plus** ist eine Behandlung der Probleme sofort und ohne Umwege über die nächste Apotheke möglich. Dauerelastische und rutschfeste Verbände garantieren keine Beeinträchtigung, die Pflaster lösen sich nicht von alleine.

Das Set schafft Abhilfe bei:

- kleinen Schnitt- und Schürfwunden
- Muskel- und Rückenschmerzen
- Verstauchungen und Zerrungen
- Blasen, etc.

Anwendung:



Kühlspray

Betroffene Hautpartie aus ca. 20 cm Entfernung mit mehreren kurzen Sprühstößen einsprühen.



Kälte-Sofort-Kompresse

Durch kräftiges Drücken mit beiden Händen die Wasserblase im Inneren zum Platzen bringen. Schütteln, fertig.



Handgelenkschutz

Die Handgelenkbandage über das schmerzende Handgelenk ziehen. Kann mehrmals verwendet werden.



Sportfixierband

Zum Tapen von Gelenken und zusätzlichem Fixieren von angebrachten Pflastern. Abreißbar.



Fingerlinge

Zum Abrollen über die Finger um Wunden, Verbände vor Feuchtigkeit zu schützen. 6 Fingerlinge pro Box.



Sprühpflaster

Auf die getrocknete und gereinigte Wunde aus ca. 5-10 cm Entfernung mehrfach aufsprühen.



Wärmepflaster

Beutel aufreißen und Folie abziehen. Pflaster auflegen, festdrücken. Für den einmaligen Gebrauch.



H-Verband & Butterfly

Verwundete Stelle säubern und anschließend das Schutzpapier entfernen. Pflaster auf die Wunde anbringen.



Wundverband selbstklebend

Pflaster mehrfach zu Wundkissen falten. Kissen auf Wunde legen, mit Verband mehrfach umwickeln.



Blasenpflaster

Schutzfolie abziehen und Pflaster auf der Blase anbringen. Gelkissen entzieht der Blase Flüssigkeit. 6 Größen.

Mindesthaltbarkeit

36 Monate

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/10	1 Box	3219

